

Dintele tău nou. Pas cu pas.

Acordă-ți timp. DentiFlex poate fi încălzit din nou și remodelat la nevoie.


În pachet

Coroanele goale în interior comandate, alese după pozițiile selectate și lățimile spațiilor în mm, împreună cu DentiFlex.

Pregătește o oglindă, un vas termorezistent, o lingură, un prosop curat și un termometru pentru apă. Spală mâinile și curăță dinții.


Citește ambele pagini înainte de a începe. Folosește doar cu dinți vecini stabili pe ambele părți și gingie sănătoasă, nevătămată. Nu introduce mâna în apa fierbinte.

1 Înmoaie DentiFlex

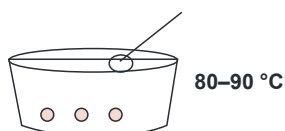


Pune o cantitate mică în apă la 80–90 °C. Așteaptă până când granulele devin transparente și modelabile. Scoate-le cu lingura.

2 Umpre coroana goală în interior

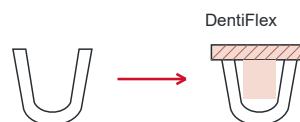


Lasă materialul să devină plăcut cald și tamponează-l ușor. Umpre interiorul fiecărei coroane cu DentiFlex moale. Păstrează material în spate și pe lateral pentru modelare.

3 Așază dinte în spațiu

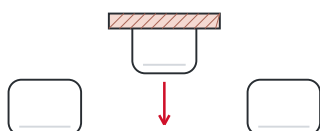


Usucă ușor zona. Introdu dinte umplut cu fața către buze și DentiFlex către limbă. Nu introduce niciodată material fierbinte.

4 Adaptează cu degetele

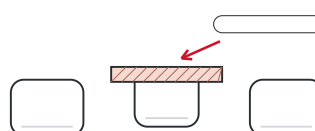


Modelează DentiFlex moale după contururile laterale ale dinților vecini. Îndepărtează surplusul cât este moale. Nu apăsa pe gingie.

5 Scoate piesa cât este moale

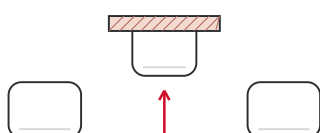

Înainte să se întărească, scoate cu grijă piesa întreagă. Astfel rămâne puțin spațiu pentru introducerea și scoaterea ulterioară. Nu o lăsa să se blocheze în gură.

6 Lasă să se întărească, apoi verifică

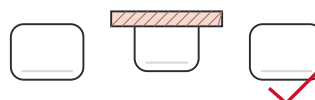

Lasă piesa să se răcească și să se întărească complet în afara gurii. Introdu-o și scoate-o din nou cu grijă. Trebuie să stea fixată fără să apese sau să se blocheze.

Desene schematic. Zona hașurată reprezintă DentiFlex. Nu indică dimensiuni sau cantități exacte.



Pentru o adaptare corectă.

Suficient de stabilă pentru purtare. Ușor de scos fără forță.

Verifică toate cele trei condiții înainte de fiecare utilizare.

- ✓ Coroana și DentiFlex sunt bine unite.
- ✓ Nu există presiune dureroasă, iar dinții se întâlnesc ca de obicei.
- ✓ Poți introduce și scoate piesa întreagă fără forță.

Dacă piesa nu se potrivește încă

Înmoaie din nou DentiFlex în afara gurii. Lasă să se răcească precum la pasul 2, apoi ajustează. Nu omite pasul 5.

Este slăbită sau cade

Nu o purta. Înmoaie din nou în afara gurii și remodelează contactele laterale. Sprijinul stabil pe ambele părți rămâne obligatoriu.

Este prea strânsă, apasă sau schimbă mușcătura

Scoate-o. Redu excesul de DentiFlex cât este moale, lasă-l să se răcească suficient și readaptează. Nu forța prin mușcare.

Coroana se separă de DentiFlex

Nu o purta. Uple din nou coroana cu DentiFlex înmuiat și verifică legătura după întărire.

Nu poți scoate piesa: Nu folosi forță, unelte sau apă fierbinte în gură. Cere ajutorul unui medic dentist.

Fiecare spațiu separat are propria piesă. Măsoară și adaptează fiecare piesă independent. Verifică să nu se lovească între ele și să nu schimbe mușcătura.

Îngrijire și păstrare

Scoate-o noaptea. Curăță zilnic cu apă caldă și o perie moale. Las-o să se usuce și păstrează-o la loc uscat, ferit de soare și de temperaturi peste 40 °C.

Când nu trebuie să folosești Denticor

Nu utiliza pe răni recente, pe gingie dureroasă, inflamată, umflată sau care sângerează, lângă dinți mobili ori dacă lipsește sprijinul dentar pe o parte. Instrucțiunile furnizate exclud și epilepsia, astmul, alergiile severe, alergiile cunoscute la material și alte boli grave. Dacă nu ești sigur, întreabă mai întâi un dentist.

Doar pentru adulți de cel puțin 18 ani. Păstrează piesele mici departe de copii. Nu le înghiți și nu purta piese slăbite sau deteriorate.

Înlocuire temporară cu scop estetic. Nu înlocuiește tratamentul stomatologic și funcția completă de mestecare.

Ai o întrebare despre adaptare? contact@denticor.ro